



Система автоматической подачи 2 × 20 образцов. Просто загрузите образцы и дождитесь результата!

Гематологические анализаторы Medonic™ M32 оснащены инновационными технологиями и расширенными функциями. Они обеспечивают общий анализ крови по 22 параметрам с дифференциацией лейкоцитов на 3 субпопуляции с высокой точностью и надежностью всего за одну минуту. Модель M32S с автоподатчиком идеально подходит для лабораторий с объемом исследований выше среднего.

Идеальный автономный анализатор

Эта первоклассная модель самостоятельно анализирует целую партию образцов. Просто предварительно загрузите 2 колеса по 20 образцов, подождите и позвольте ему выполнить свою работу! Эту функцию могут предложить и другие производители, но часто лаборатории приходится покупать более крупное и дорогое оборудование, эксплуатация которого обходится дороже. Колесо для образцов вмещает 20 стандартных пробирок от 4,0 до 5,0 мл. Также доступны пробоотборные колеса, специально разработанные для пробирок Sarstedt. Medonic M32S не только компактен, но и очень прост в эксплуатации.



Анализируйте целую партию образцов

Удобный в использовании графический интерфейс

Обновленное программное обеспечение также позволяет **M32S** оставаться в первых рядах среди автоматизированных гематологических анализаторов, упрощая рабочие процессы и предоставляя пользователям лучший контроль над результатами исследований и информацией о пациентах. Система меню проста для понимания и удобна в навигации.



Интуитивно понятное программное обеспечение упрощает рабочие процессы

Современный пользовательский интерфейс, общий для всех анализаторов **Medonic™ M32** серии, оснащен удобным для глаз 7-дюймовым сенсорным дисплеем с цветным экраном WVGA с разрешением 800 x 480 пикселей в альбомной ориентации. Его сдержанный, лаконичный дизайн способствует бесперебойной работе и точной оценке результатов.

Простое пошаговое управление

Анализ образца венозной крови с помощью автоподатчика **M32S** очень прост.

1. Разблокируйте колесо отбора проб, загрузите пробирки так, чтобы этикетки со штрих-кодом были обращены к анализатору и установите колесо в анализатор.
2. Запустите пробоотборное устройство простым нажатием кнопки. Доступны два варианта:
 - 1-минутное перемешивание, если пробирки уже хорошо перемешаны.
 - дополнительное время перемешивания, которое можно установить от 1 до 15 минут.Большинство функций предварительно настроены.
3. Идентификационные номера образцов будут автоматически считаны внутренним считывателем штрих-кодов. Если на пробирках нет этикеток со штрих-кодом, можно ввести идентификаторы образцов в рабочий список вручную.
4. Статус образца вместе с информацией о положении, последовательности, идентификаторе образца и профиле отображаются в меню анализатора.
5. Просмотрите и проанализируйте результаты.

Medonic M32 – Гематологические системы без компромиссов

Все гематологические анализаторы **Medonic M32** серии высокопроизводительны и просты в использовании. Кроме того, они обладают высокой надежностью, встроенным контролем качества и низкими затратами на техническое обслуживание прибора.

Medonic M32S также предлагает уникальную функцию микрокапиллярного адаптера MPA.

Используйте микрокапиллярный адаптер, когда вам необходимо получить быстрый и точный результат. MPA превращает **Medonic M-series M32** в самую быструю систему исследования общего анализа крови в современном мире!



Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о гематологических системах Medonic M-series M32: