

Экспресс-тест на гепатит В (HBsAg)

Одноэтапный тест Wondfo HBsAg в цельной крови/сыворотке/плазме - это быстрый иммунохроматографический тест для визуального выявления поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в цельной крови/ сыворотке /образце плазмы.

HBsAg (поверхностный антиген гепатита В) является первым серологическим маркером, появляющимся при новой острой инфекции, который может быть обнаружен уже через 1 неделю и позднее через 9 недель, в среднем через месяц после контакта с вирусом гепатита В (HBV).



ВРЕМЯ РЕАКЦИИ

10~15 минут

ОБРАЗЕЦ

Цельная кровь/Сыворотка/Плазма

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

4°C ~ 30°C

ФОРМАТ

Лента/Кассета

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца

ПРИМЕНЕНИЕ

Инфекционное отделение / Отделение гастроэнтерологии/ Банк крови / Скрининг крови / Клиническое обследование / Тест при оказании первой помощи / Быстрый осмотр доноров крови /и т.д.


ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективность одноэтапного анализа цельной крови/сыворотки/плазмы на HBsAg Wondfo была сравнена с коммерческим набором.

	Положительный (n=210)	Отрицательный (n=278)	Суммарный (n=488)	Чувствительность	Специфичность
тестовый набор HBsAg	+202/210	-276/278	478/488	96.2%	99.3%
Иммуно-ферментный	+204/210	-277/278	481/488	97.1%	99.6%

Чувствительность: 96.2% ; Специфичность: 99.3%

ВРЕМЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА В

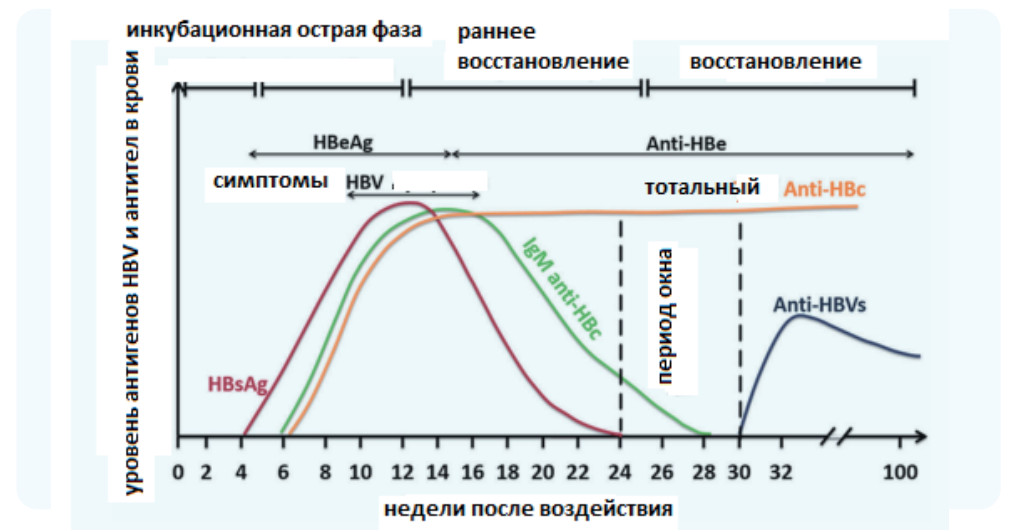

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Наименование	Формат	Кол-во в упаковке	Артикул
Анализ крови/ сыворотка/ плазма	Полоска	50 тестов/упаковка	W003-S